

NÁVOD K POUŽITÍ ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

HemaCut[®] SPRAY

HemaCut[®] SPRAY je inovativní zdravotnický prostředek ve formě spreje, který obsahuje patentovaný síťovaný polymer TRISS se zabudovanými stericky stíněnými aminy. Po nanesení na kůži vytvoří přilnavou, průhlednou, prodyšnou a voděodolnou ochrannou krycí vrstvu. Tato vrstva vykazuje protizánětlivý účinek, čímž pozitivně přispívá k prevenci zánětu a hojení ran na kůži.

SLOŽENÍ:



ZP **HemaCut[®] SPRAY** obsahuje síťovaný polymer TRISS se zabudovanými stericky stíněnými aminy a hexamethyldisiloxan. Zdravotnický prostředek **HemaCut[®] SPRAY** má unikátní patentovanou strukturu polymerní sítě se schopností vychytávat reaktivní sloučeniny kyslíku z rány. Po nanesení na pokožku a odpaření kapalně složky vytvoří ihned přilnavý film, který detailně kopíruje povrch rány. Kromě podpory hojení slouží tento film také jako ochrana proti kontaminaci rány mikroorganismy a mechanickými nečistotami zvenčí. Na ráně zaschne, nezůstává lepkavý a díky tomu na něm neulpívají nečistoty a není nutné dále ránu překrývat obvazem nebo náplastí. Film je transparentní po celou dobu hojení, čímž se zajistí snadné sledování stavu rány. Složení ZP **HemaCut[®] SPRAY** je chráněno českým patentem.

URČENÝ ÚČEL POUŽITÍ:

ZP **HemaCut[®] SPRAY** je určen pro hojení povrchových poranění kůže jako jsou drobné trhliny a praskliny kůže, popáleniny I. a IIa stupně, řezné, sečné a tržné rány, odřeniny, puchýře a další povrchová poranění různé etiologie.

POKYNY PRO POUŽITÍ:

1. Ránu omyjte pod tekoucí vodou a nechte uschnout nebo opatrně osušte.
2. Na menší rány stříkněte **HemaCut[®] SPRAY** ze vzdálenosti 1 – 2 cm tak, aby rozptýl spreje byl menší a mířil na ránu.
3. Na větší rány stříkněte **HemaCut[®] SPRAY** ze vzdálenosti 4 – 8 cm podle rozsahu rány tak, aby byl sprej aplikován na co největší plochu rány najednou.
4. Sprej aplikujte jedním nebo dvěma stisknutími rozprašovače. Mezi jednotlivými nástřiky vyčkejte cca 10 sekund.
5. Polymer vytvoří voděodolnou vrstvu, která se z kůže a z rány mechanicky nestírá, proto stačí aplikace 1x za 24 hodin nebo 1x za 12 hodin, pokud to stav rány vyžaduje.
6. Před další aplikací stačí opět jen ránu opláchnout pod tekoucí vodou a osušit.
7. Před použitím spreje mechanicky nehtem nebo prstem odstraňte případné zbytky polymeru z rozprašovače, tak aby nebránily rozptýlu spreje.

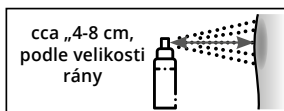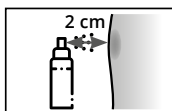

UPOZORNĚNÍ:

V případě výskytu vedlejších nežádoucích účinků (zvýšená bolestivost, zarudnutí, alergické reakce apod.) přerušete léčbu a kontaktujte ošetřujícího lékaře. Pouze pro vnější použití. Nepoužívejte vnitřně! Nepoužívejte po uplynutí expirační doby uvedené na lahvičce. Nepoužitý prostředek nebo prostředek s prošlou expirací vraťte do lékárny. Použití u dětí, těhotných a kojících se doporučuje po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Výrobek na ránu aplikujte nejdéle po dobu 30 dnů. Použití delší než 30 dnů konzultujte s lékařem. Před použitím protřepejte. Po použití může dojít k zaschnutí přípravku na trysce rozprašovače. Pokud se tak stane, odstraňte zaschlý přípravek z trysky mechanicky prstem nebo nehtem. Udržujte mimo dosah dětí.

POZOR, VYSOCE HOŘLAVÁ TEKUTINA A VÝPARY!



Kapalná forma přípravku je vysoce hořlavá až do úplného zaschnutí. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně a zdrojů vznícení. Používejte v dobře větraných místnostech. Uchovávejte mimo dosah dětí. POZOR, přípravek obsahuje hořlavou látku.

BALENÍ:

Lahvička 15 ml nebo 30 ml s mechanickým rozprašovačem.

UCHOVÁVÁNÍ:

Uchovávejte při teplotě 15°C – 25°C.

VÝROBCE:

■ VH Pharma a.s., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Česká republika, vpharma@vpharma.cz, www.vpharma.cz.



Datum poslední revize: 11. 3. 2021